

## Cementering af MK krone med Panavia F 2.0



Provisoriet fjernes.  
Præparationen rengøres.  
Kronen indprøves og rengøres  
efterfølgende.



ED Primer A & B blandes 1:1  
og appliceres til hele  
præparationen. ED Primeren  
efterslades i 30 sekunder,  
hvorefter der lufttørres med  
let luft i 3-4 sekunder.



Er metalkappen af ædel metal-  
legering, kan denne forbehandles  
med Alloy Primer for optimal  
kemisk adhæsion.  
Applicer Alloy Primer til metallet,  
efterslad 10 sekunder og pust.



Panavia pasta A & B blandes  
1:1 med plastspatel og  
appliceres til indersiden af  
kronen.



Kronen føres beslutsomt på  
plads og trykkes helt i position.



Der lyses i 2-3 sekunder facialt  
og palatinalt.  
Det største cementoverskud kan  
herefter fjernes nemt.



Oxyguard appliceres til hele  
præparationsperiferien og  
afbinding efterlades uforstyrret  
i 3 minutter - eller der lyses  
40 sek. facialt og palatinalt,  
såfremt periferien er synlig.



Oxyguard skylles væk og det  
sidste cementoverskud fjernes.